



AirFit™ F40

Comment mettre en place l'AirFit F40



1 Détachez les sangles inférieures du cadre et placez le coussin sous le nez pour l'ajuster au visage.

Le logo ResMed étant orienté vers le haut, tirez le casque sur la tête.



2 Ramenez les sangles inférieures derrière les oreilles et fixez-les à nouveau au cadre à l'aide des clips magnétiques.*

Faites passer les cheveux plus longs par l'arrière du cadre, si nécessaire.



3 Ajustez les sangles supérieures et les sangles inférieures pour un meilleur ajustement.



Balayez le code QR pour obtenir des instructions vidéo complètes.

Découvrez le ResMed AirFit F40 dès aujourd'hui.

Le masque complet ultra-compact qui combine de hautes performances d'étanchéité et le confort dans un design flexible et facile à mettre en place. Il vous est proposé par ResMed, la marque de produits pour l'apnée du sommeil à laquelle les médecins spécialistes du sommeil font le plus confiance.²

L'AirFit F40 de ResMed. Un masque minimaliste, optimisé pour tous.



Balayez le code QR ou contactez votre représentant ResMed.



* Ce masque contient des aimants qui peuvent interférer avec certains implants ou dispositifs médicaux. Veuillez consulter le guide de l'utilisateur pour obtenir des informations complètes sur l'étiquetage, y compris les contre-indications et les avertissements relatifs à l'aimant.

¹ ResMed a mené des études cliniques externes sur des utilisateurs actuels de PPC ayant suivi un traitement ≥ 12 mois avec des masques ResMed ou concurrents et ayant respecté les 90 jours au cours des trois mois précédant l'étude. Tous les participants ont utilisé le ResMed AirFit F40 et le Fisher & Paykel Evora Full pendant sept nuits chacun, dans un ordre aléatoire. Études menées en Australie et aux États-Unis, du 4 octobre au 20 novembre 2023. n=29 (Australie) et n=57 (États-Unis)

² Étude ResMed sur les médecins du sommeil certifiés aux États-Unis. Étude réalisée du 12 août au 6 septembre 2022. n=200

Distribué par ResMed Corp, 9001 Spectrum Center Boulevard, San Diego, CA 92123, É.-U. AirFit, AdaptiSeal et QuietAir sont des marques déposées de la famille d'entreprises ResMed. Pour obtenir des renseignements sur les brevets et autres propriétés intellectuelles, visitez le site ResMed.com/ip. © ResMed, 2024. 10114061/1 03-2024



Vous avez fait ma soirée.

L'AirFit F40 de ResMed

Un masque minimaliste.
Optimisé pour tous.



Présentation du ResMed AirFit™ F40

Ce masque s'appuie sur ce que vous—et vos patients—apprécient dans les masques ResMed, en ajoutant un cadre entièrement flexible avec de nouveaux coussins en silicone souple et moins de points de réglage pour une mise en place facile et confortable. La conception ultra-compacte sous le nez permet des routines de coucher et des positions de sommeil flexibles. De plus, il est facile à mettre et à enlever, même au milieu de la nuit.

98 %
Une large gamme¹

Nouveau AdaptiSeal™ coussin facial complet

Le silicone doux s'adapte sur le visage, conçu pour maintenir l'étanchéité.

Coude à dégagement rapide

Facilite la connexion et la déconnexion à la thérapie.

Tube court

Réduit la traînée et se déplace avec le patient.



Points de réglage du casque 1 2 3 4

Deux points de réglage supérieurs et deux points de réglage inférieurs simplifient la mise en place et l'utilisation.

Cadre flexible du masque

Cadre en plastique recouvert d'un rembourrage en nylon souple. Le cadre se situe sous les yeux, conçu pour le confort et pour réduire les marques sur le visage.

Clips magnétiques*

S'embroient et se déboîtent facilement, même au milieu de la nuit.

Ventilation diffuse QuietAir™

Intégrée au coussin pour offrir un environnement de chambre à coucher plus paisible.

Système de masque complet

64600
64601
64602
64603
64604



Systèmes de cadres 64607, 64608, 64609

AirFit™ F40

AirFit F40

Système de masque complet

(comprenant le cadre du masque, le coussin facial et le casque)

Nom du produit	Numéro de modèle
Système AirFit F40 – PL/STD AMER	64600
Système AirFit F40 – M/STD AMER	64601
Système AirFit F40 – L/STD AMER	64602
Système AirFit F40 – M/PT AMER	64603
Système AirFit F40 – M/LGE AMER	64604

Système de cadre

(comprend le cadre du masque et le coussin facial complet)

Nom du produit	Numéro de modèle
Système de cadre AirFit F40 — PL	64607
Système de cadre AirFit F40 — M	64608
Système de cadre AirFit F40 — L	64609


Coussin facial complet

Nom du produit	Numéro de modèle
Coussin AirFit F40 Petit large	64627
Coussin AirFit F40 Moyen	64628
Coussin AirFit F40 Large	64629

Casque

Nom du produit	Numéro de modèle
Casque AirFit F40 PT	64633
Casque AirFit F40 STD	64634
Casque AirFit F40 LGE	64635

*Le masque contient des aimants qui peuvent interférer avec certains implants ou dispositifs médicaux. Veuillez consulter le guide de l'utilisateur pour obtenir des informations complètes sur l'étiquetage, y compris les contre-indications et les avertissements relatifs à l'aimant.

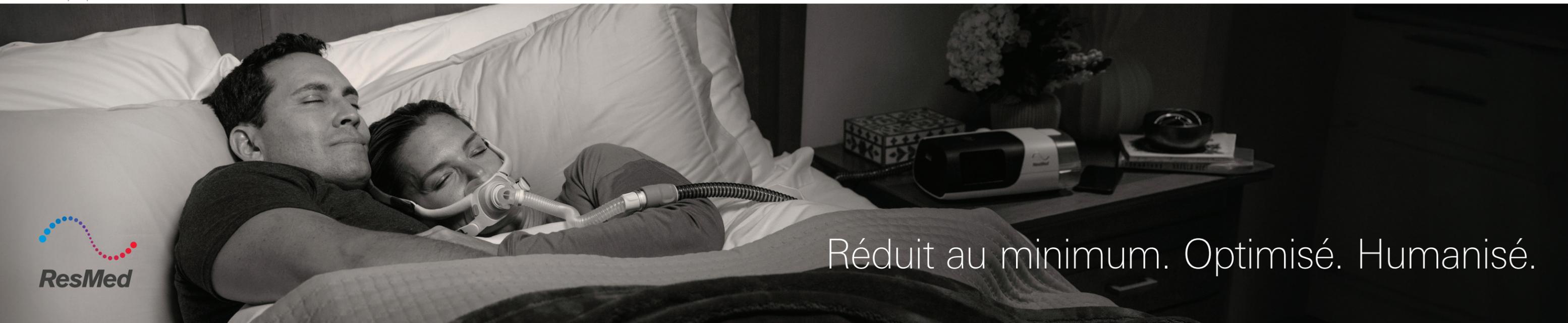

Réduit au minimum. Optimisé. Humanisé.