



PHILIPS

Apnée du sommeil

DreamWear

Conçu pour oublier que vous portez
un masque



Philips réinvente le masque

Suite à une écoute approfondie des besoins des patients, nos équipes pluridisciplinaires (équipes cliniques, R&D, design, dermatologues...) ont eu à coeur d'apporter des solutions efficaces aux problèmes de marques sur la peau et d'encombrement partagés par ces patients.


C'est pour offrir la meilleure expérience du traitement que DreamWear a été développé.

source : AVID

innovation  you

Mon DreamWear en 6 étapes

Le choix de la taille du coussin et du harnais est essentiel pour une bonne étanchéité et stabilité du masque et un traitement efficace.

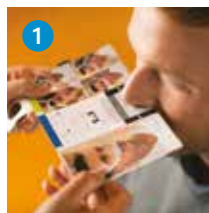

1 Choix de la taille du coussin

Utilisez le gabarit pour connaître la bonne taille de coussin : S, M, L, MW.



4 Mise en place du harnais

Positionnez le harnais vers le bas de la tête, ajustez-le si nécessaire sans le serrer trop fort.



2 Mise en place du coussin et du conduit

Clipsez le coussin sur le conduit puis positionnez le coussin en dessous du nez.



5 Choix de la taille du conduit

Positionnez le conduit entre l'oreille et l'oeil.



3 Mise en place du circuit

Installez le circuit au-dessus de la tête.



6 Entretien

Pour un bon entretien du masque :

- lavez le coussin à l'eau savonneuse chaque jour
- lavez l'ensemble du masque à l'eau savonneuse une fois par semaine

Astuces pour une bonne mise en place du DreamWear



Si le conduit est trop proche des yeux, une taille plus grande (LG) est requise.



Si le conduit est trop proche des oreilles, une taille plus petite (SM) est requise.

Pour une première mise en place réussie, retrouvez tous les guides vidéos sur www.philips.fr/dreamwear

Retrouvez la réponse à vos questions pratiques sur www.apneesommeil.fr

En savoir plus sur www.apneesommeil.fr



Tutoriels vidéo de choix de taille, réglage et entretien, pour vous guider pas à pas.



Passez le test du bisou !
Grâce à la fuite intentionnelle située sur le dessus de la tête, le DreamWear a été conçu pour ne plus gêner votre conjoint et faciliter l'adoption du traitement.



Jeu « Mon passeport apnée du sommeil », pour découvrir comment devenir acteur de votre traitement en 6 étapes.

Mettre toutes les chances de votre côté pour **réussir votre traitement**

Le choix de l'appareil de PPC* est une étape clé dans la prise en charge de l'apnée du sommeil. DreamStation Expert a été conçue pour vous offrir la meilleure expérience patient.



Retrouvez la DreamStation Expert sur www.philips.fr/dreamstation.
Prenez votre traitement en main, parlez-en à votre médecin !

* Pression Positive Continue

Découvrez le DreamWear

Ce masque à contact minimal a été conçu pour vous offrir la meilleure expérience de traitement par PPC* du Syndrome d'Apnées du Sommeil.

Champ de vision dégagé

Connexion du circuit sur le haut de la tête, idéal si vous portez des lunettes.

Plus de liberté de mouvement

Circuit sur le haut de la tête et conduit d'air sur deux côtés.

Prévention des marques rouges

Conduit d'air très léger en silicone.

Réduction des irritations

Mini coussin nasal.

Discrétion pour le conjoint

Élégance du masque et fuite intentionnelle située au dessus de la tête.

Meilleure stabilité

Harnais antidérapant.



Visualisez le DreamWear en **3D** sur www.philips.fr/dreamwear

* Pression Positive Continue



DreamWear est un masque destiné à servir d'interface patient dans l'application d'une thérapie PPC pour le traitement du Syndrome d'Apnées du Sommeil ou à deux niveaux de pression pour le traitement de l'insuffisance respiratoire. Le système DreamStation est destiné à délivrer un traitement par pression positive pour le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS) aux patients de plus de 30 kg à respiration spontanée. L'appareil est conçu pour être utilisé à domicile ou en milieu hospitalier/ institution. Ces DM de classe IIa sont des produits de santé réglementés, qui portent, au titre de cette Réglementation, le marquage CE, dont l'évaluation de conformité a été réalisée par TÜV. Lire attentivement le manuel de l'utilisateur fourni avec le dispositif, pour une utilisation en toute sécurité.

Fabricant : Philips - 1001 Murry Ridge Lane - Murrysville - PA 15668 - États-Unis

Mandataire Européen (EC REP) : Respironics Deutschland - Gewerbestrasse 17 - 82211 Herrsching - Allemagne

Date de création : 04/04/2016